

檢驗名稱	Sputum culture	中文名稱	痰液培養
檢驗代碼	culsp	健保編號 (點數)	13007C、13009B (350)
檢體種類	Sputum	檢驗方法	VITEK 2 Compact 全自動微生物分析儀
採集容器	50ml 尖底無菌管。	操作時間	每週一~週六
採檢體量	5~10ml 的痰液。	報告時間	陰性：3 天、陽性：配合細菌生長發出，約 3-5 天
送檢時間	24 小時收檢，如無法立即送檢須將檢體放置 4°C 冷藏，並於 24 小時內送檢	操作單位	檢驗科細菌室
採檢注意	<p>1. 請採檢人員教導病人由深部吐出痰液。吐痰前需先用開水漱口，而後馬上取檢體，若檢體中都是口水，則須重取。</p> <p>2. 無法自己吐痰的患者，可經抽痰或用引流方式取出。</p>		
檢體保存	採檢後確定瓶蓋旋緊後馬上送檢，如無法馬上送檢應置於 2°C~8°C 冰箱保存。收檢後保存於 2°C~8°C 冰箱		
生物參考區間	Mixed normal pharyngeal flora	可報告範圍	<p>1. Mixed normal pharyngeal flora</p> <p>2. Microorganisms isolated</p>
臨床意義	主要是針對引起下呼吸道疾病的病原菌之鑑定，例如細菌性肺炎、慢性支氣管炎、支氣管擴張症等。		
備註	<p>1. BAP：Sta aureus、β-hemolytic Streptococcus and Strep.pneumonia</p> <p>2. EMB：G(-)bacilli 在 sputum 中屬於 potential pathogen 除非量多於第三區或是 pure culture 才予以鑑定。</p> <p>3. Chocolate：Haemophilus spp.</p>		

修訂日期:2024.11.18