

檢驗名稱	糞便潛血/運鐵蛋白快速檢驗	英文名稱	iFOB/TF rapid test
檢驗代碼	obtff	健保編號(點數)	09134C(80) +12047B(160)
檢體種類	stool	檢驗方法	免疫層相法
採集容器	糞便採集管	操作時間	每天
採檢體量	0.1 g	報告時間	40 分鐘
送檢時間	24 小時	操作單位	檢驗科
採檢注意	<p>(1)打開夾鏈袋內採便套組，以採便棒反覆滾動糞便的不同部位，填滿採便棒前端之溝槽(約 0.1g)，將採便棒旋回採便器中，確認旋緊後送檢。</p> <p>(2)採用本方法是不需飲食上的限制。</p> <p>(3)在女性生理期出血時不宜採樣。</p> <p>(4)在痔瘡出血時不宜採樣。</p> <p>(5)嚴重下痢或水便不宜採樣。</p>		
檢體保存	<p>(1) 室溫(15-30°C)保存勿超過6小時</p> <p>(2) 2-8°C 保存勿超過3天</p>		
生物參考區間	Negative	可報告範圍	不適用
臨床意義	<p>FOB(+)/TF(+):確定存在消化道出血, 需進一步檢查出血原因。</p> <p>FOB(-)/TF(+): 消化道存在出血,但上消化道出血的可能性較高,需進一步檢查出血原因。</p> <p>FOB(+)/TF(-): 消化道存在出血,但下消化道出血的可能性較高,需進一步檢查出血原因。</p> <p>FOB(-)/TF(-): 陰性反應</p>		
備註			